

## **Dcont® Roll beszélő vércukormérő**

### Használati útmutató:

1. Mossa, majd szárítsa meg a kezét mérés előtt.
2. A tesztcsík kivétele után a tubust azonnal kattanásig zárja vissza!
3. A tesztcsík behelyezésére bekapcsol a készülék
4. A vérvételi eszköz segítségével szűrje meg az ujját a mérés elvégzéséhez.
  - A szűrés erőssége 1-5 erősségre állítható, az ujjbegyszűrő fejrészének elcsavarásával.
  - Az ujjbegyszűrő eszköz alját kattanásig húzza ki, érintse az ujjához, a középső gomb megnyomásával indítsa el a szűrást
5. A vérminta felszívásához érintse a vércseppet a tesztcsík sárga (tapintásra vastagabb) végéhez, vagy a sarkához
6. A készülék automatikusan elvégzi a mérést és 4 másodperc után megjelenik az eredmény.
7. A szélső (BALRA és JOBBRA) gombokkal megjelölhető a mért vércukorérték, a beállított jelölő mentéséhez nyomja meg a középső (KI-BE-OK) gombot

A készülék oldalán lévő csíkidobó segítségével eltávolíthatja a használt tesztcsíkot a készülékből